

治療をサポートするアイテム
メディカル・ユース
(治療用)



Q. アイパッチって何ですか？

A. 弱視治療に用いられる、
大切なアイテムです。

眼の成長をさまたげる要因の一つとして「弱視」があります。「弱視」とは、視覚の発達期に視覚刺激が不十分であったために起った視力の未発達状態をいいます。弱視の種類は主に以下の4つがあります。

1. 屈折異常弱視
2. 不同視弱視
3. 斜視弱視
4. 遮蔽弱視

このうち、例えば不同視弱視では、一方の眼の視力は発達しているにも関わらず、不同視が原因で他方の視力発達が遅れ、片眼だけ弱視になります。治療方法は、眼鏡による完全屈折矯正と、健眼遮蔽(視力が出る眼を遮蔽し、弱視眼を強制的に使用させ、視力の発達を促すこと)があります。この視能訓練用のアイテムが、アイパッチです。

アイパッチには、①眼に貼るタイプ、②メガネに装着し使用する布製タイプがあ



渡部 直子
ゆめおーおか眼科 院長

日本眼科学会専門医。
慶應義塾大学医学部卒業後、慶應大学付属病院眼科に入局。国立小児病院、国立東京第二病院眼科等の勤務を経て、2006年12月、ゆめおーおか眼科院長に就任。(名称は当時)

ります。①は、しっかり眼を覆うので、完全に光が遮蔽されます。ただ、肌の弱いお子様の場合は、まれに赤くかぶれたり、はがす時に痛がるケースがあります。

そのような場合には、②の布製アイパッチにするという手段が挙げられます。肌への負担が少なく、カラフルなデザインでお子様楽しく視能訓練できるでしょう。ただし、正しく使用しないと、遮蔽効果が上がりません。布製アイパッチの使用に関しては、担当医師の許可と指導のもと、正しく使用しましょう。

「JOY-PATCH」は布製タイプですが、眼に貼るタイプも店頭にてご用意しております。

アイパッチ (貼るタイプ)



アイパッチ A1ホワイト
12枚入り

通気性がよく、蒸れにくい素材。一回りサイズの大きい「A2」や肌色タイプの「ベージュ」もあります。

斜視・弱視訓練用の遮蔽用眼帯です。

- * 粘着テープで完全に遮蔽できます。
- * 左右どちらの眼にも使用できます。
- * 通気性に優れており、皮膚刺激の低いアクリル系粘着剤を使用しています。

😊 こんな工夫をしています！

- * 好きな絵を描くことで喜んで貼ってくれます。
- * 大人の手の甲に一度貼って、はがし、粘着力を調節。はがす時の刺激が和らぎます。